

# AFTY I DROBNE RANY W JAMIE USTNEJ



## 1. Czym są afty?

- afty to bolesne nadżerki oraz owrzodzenia błony śluzowej, pojedyncze lub mnogie, kształtu okrągłego lub owalnego, pokryte włóknikowym nalotem, otoczone rąbkami zapalnym.

## 2. Gdzie występują afty?

- najczęstszym umiejscowieniem afty jest nierogowacząca błona śluzowa warg i policzków, dolna powierzchnia języka, podniebienie miękkie i łuki podniebienne oraz dno jamy ustnej.

## 3. Jakie czynniki przyczyniają się do powstawania aft?

- urazy mechaniczne powstałe wskutek ugryzienia się w policzek, zbyt mocne szczotkowanie zębów czy też protezę lub aparat ortodontyczny,
- stres,
- miesiączka,
- zaburzenia odporności.

## 4. Jakie objawy poprzedzają pojawienie się aft?

- pojawienie się wykwitów o typie aft na błonie śluzowej poprzedza wystąpienie objawów odczuwanych przez pacjentów jako mrowienie i pieczenie,
- objawy te występują od 24 do 48 godzin przed pojawieniem się wykwitu aftowego w postaci czerwonej plamy lub plamki, rzadziej grudki, pęcherzyka.

# PRODUKT URGO NA AFTY I DROBNE RANY W JAMIE USTNEJ Z TECHNOLOGIĄ FILMOGEL®

**Filmogel®**  
TECHNOLOGY

## 5. Czym jest technologia filmogel®?

- technologia opatentowana przez URGO oparta na warstwie ochronnej w płynie,
- po nałożeniu na ranę produktu w technologii filmogel® na jej powierzchni tworzy się ochronna powłoka tzw. film o właściwościach leczących i przyspieszających gojenie, która: zasklepia, chroni, izoluje, wypełnia, leczy i daje ulgę w bólu,
- w zależności od przeznaczenia produktu, leczniczy żel wzbogacony jest o odpowiednie składniki szybko przynoszące ulgę w danej dolegliwości,
- technologia filmogel® zapewnia: elastyczność, wytrzymałość, dyskrecję.

## 6. Jakie składniki czynne farmakologicznie zawarte są w filmogel® w produkcie URGO na AFTY i drobne rany w jamie ustnej?

- pochodne celulozy – tworzą warstwę ochronną (tzw. film), pokrywają zakończenia nerwowe łagodząc dolegliwości bólowe.

## 7. Jak działa URGO na AFTY i drobne rany w jamie ustnej?

# DZIAŁA JUŻ PO 10 s IZOLUJE RANĘ AŻ DO 4 h

## Skuteczność działania potwierdzona w badaniach klinicznych

SKUTECZNOŚĆ = NATYCHMIASTOWA ULGA W BÓLU

### ŁAGODZENIE BÓLU - NASILENIE BÓLU ZNACZĄCO ZMNIJSZA SIĘ

- o 74% natychmiast po zastosowaniu
- o 93% na koniec leczenia

### LIKWIDACJA STANU ZAPALNEGO

- po 3 dniach likwiduje stan zapalny o 100%

# PRODUKT URGO NA AFTY I DROBNE RANY W JAMIE USTNEJ Z TECHNOLOGIĄ FILMOGEL®

Filmogel®  
TECHNOLOGY

## 8. Jakie są zalety stosowania URGO na AFTY i drobne rany w jamie ustnej?



URGO na AFTY i drobne rany w jamie ustnej to leczniczy opatrunek w płynie, który:

- izoluje ranę od pokarmu i drobnoustrojów **do 4 h**,
- szybko likwiduje ból – już po 10 s,
- działa skutecznie nawet w trakcie posiłku,
- ułatwia i przyspiesza gojenie,
- posiada dobrą tolerancję przy długotrwałym stosowaniu np. przy urazach spowodowanych aparatami ortodontycznymi,



Buteleczka 6ml.  
Smak tutti frutti.



Higieniczna szpatułka  
i precyzyjne nakładanie

- jest skuteczny – **90% satysfakcji konsumentów**,
- żelowa konsystencja sprawia, że produkt łatwo nakłada się na ranę, a specjalna szpatułka umożliwia jego nałożenie, dzięki temu można dotrzeć do trudno dostępnych ran umiejscowionych w jamie ustnej,
- aplikacja dostosowana do wielkości rany, a nie na odwrót,
- jest wodoodporny,
- może być stosowany u dzieci od 6 roku życia,
- przepuszcza powietrze, a nie wodę, stwarzając idealne warunki do gojenia się rany.

Skład: pochodna celulozy, kwas mineralny, kwasy karboksylowe, alkohol, woda, aromat.

WYSTARCZY  
NA  
**40**  
APLIKACJI

OD  
**6**  
ROKU  
ŻYCIA

**6** ml

SMAK  
TUTTI  
FRUTTI

URGO